

# NÁVOD K POUŽITÍ

## Účel použití

Výrobek je zdravotnický prostředek určený k vyjmutí klíštěte z těla člověka a zvířat.

Doporučuje se k prevenci klíšťových onemocnění, jakými jsou: klíšťová encefalitida, lymbská borelióza, babesióza, anaplasmóza a další.

## Způsob účinku

Dochází ke zmrazení klíštěte, čímž se zabráni uvolnění nakažlivých slin při odstraňování klíštěte. Technologie dokonale pokryje tělo klíštěte a brání jeho roztržení, čímž se snižuje riziko kontaktu s infekčními látkami při odstraňování klíštěte. Sada obsahuje kleště pro bezpečné a účinné vyjmutí klíštěte, čímž se ještě snižuje riziko přenosu infekčních látek při odstraňování klíštěte z těla.

## Pokyny k použití

### Krok 1: Zmrazení přísátého klíštěte

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
Sejměte kleště připojené k nádobce se sprejem.	Odemkněte sprej otočením proti směru hodinových ručiček z uzavřené do otevřené polohy.	Pečlivě umístěte trysku spreje kolem klíštěte.	Co nejlépe stiskněte tlačítko spreje, aby se uvolnila plná dávka* přípravku.	Po aplikaci je třeba sprej zabezpečit otočením uzávěru z otevřené polohy na uzavřenou.

**! Před prvním použitím je třeba sprej aktivovat dvěma stisky tlačítka.**



\* počet dávek závisí na velikosti klíštěte (viz následující tabulka):

Larvy a nymfy klíštěte obecného ( <i>Ixodes ricinus</i> )	Samičky klíštěte obecného ( <i>Ixodes ricinus</i> )	Samičky pijáka lužního ( <i>Dermacentor reticulatus</i> )
1 dávka	2 dávky	2 dávky
0,8 mm   1,5 mm	~3,5 mm	~5 mm
strana A	strana B	

### Krok 2: Vyjmutí zmrazeného klíštěte

K vyjmutí zmrazeného klíštěte dle lékařských doporučení použijte kleště.

Použitím kleští dle pokynů dojde k vyjmutí nepoškozeného klíštěte a sniží se možnost přenosu infekčních látek během jeho odstraňování.

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
Zvolte nejvhodnější stranu kleští podle velikosti klíštěte.	Pevně za kleště zatahnete směrem nahoru.	Zkontrolujte, že v těle nezbyla žádná část klíštěte. Ošetřovanou oblast vydezinfikujte.	Vyjmuté klíště zlikvidujte nebo jej vložte do zkumavky a zašlete na vyšetření.	Vydezinfikujte všechny pomůcky použité při odstraňování klíštěte. Pečlivě si umyjte ruce mýdlem a vodou nebo si je vydezinfikujte.

**DŮLEŽITÉ!**

- Nesprávný postup může vést k poškození klíštěte a kontaktu s infekčními látkami. K zabránění přímému kontaktu s klíštětem se při jeho odstraňování doporučuje použití ochranných rukavic.
- Pokud je klíště odhaleno velmi pozdě, dochází k trvalému přísátí jeho ústní části, a vyjmutí je pak mnohem obtížnější. Pokud v kůži po vyjmutí zůstanou nějaké části klíštěte, musejí být odstraněny lékařem.

## Další informace

**Pokud je klíště v těžko přístupné oblasti, např. v podpaží, za ušima nebo v tříslé, možná budete muset při jeho odstraňování požádat o pomoc další osobu.**

Po vyjmutí klíštěte ošetřovanou oblast několik týdnů sledujte. Výskyt místního nebo celkového zánětu může být důsledkem přenosu infekčních látek tímto parazitem. Pokud se nebudete cítit dobře, objeví se horečka nebo zarudnutí (erytém) typické pro lymbskou boreliózu, je nutné, abyste okamžitě kontaktovali lékaře nebo lékárníka.

## Upozornění a opatření

- Používejte pouze dle pokynů, dodržujte návod.
  - Nepoužívejte u dětí do 3 let.
  - U dětí používejte pouze pod dohledem dospělé osoby.
  - Nepoužívejte na poraněnou kůži.
  - Nepoužívejte v případě alergie na kteroukoliv složku.
  - Zabraňte kontaktu s očima, ústní dutinou, nosem či krkem a intimními oblastmi.
  - Nevdechujte.
  - Vysoké dávky mohou způsobit zčervenání. V takovém případě používání tohoto zdravotnického prostředku okamžitě ukončete a kůži opláchněte velkým množstvím teplé (ne však horké!) vody a osušte ji.
  - V případě přetrvávajících kožních změn (zbělení či zčervenání, otok, bolest) se poraďte s lékařem či lékárníkem.
- Pouze k vnějšímu použití.**

## Obsah sady zařízení a složení

- Zařízení sprej k rychlému zmrazení klíštěte : isohexadekan, isopropyl-myristát, 1,1,1,2-tetrafluoroetan.
- Zařízení klíště k bezpečnému vyjmutí klíštěte.
- Zkumavka.

## Varování!

Sada obsahuje nádobu pod tlakem. Při zahívání se může roztrhnout. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zápalení. Nepropichujte nebo nespálujte ani po použití. Chraňte před slunečním zářením. Skladujte mimo dosah dětí.

## Skladování

Składujte v původním obalu, mimo dosah dětí, při teplotě do 40°C.

## Distributor

Ceumed s.r.o.  
602 00 Brno Příkop 27/2a, Czech Republic



**Výrobce**  
ICB Pharma

Tomasz Świątowski, Paweł Świątowski Spółka Jawna  
6a Moździerzowców Street, 43-602 Jaworznica, Poland

