

Instrukce pro použití odběrové soupravy Isohelix RD-01 pro bukální stěr se sáčkem RapiDri

Určeno pro odběr buněk z dutiny ústní. Pouze na jedno použití.

Skladujte při pokojové teplotě.

Před samotným provedením odběru si umyjte ruce!

Nejméně jednu hodinu před odběrem Vaší DNA nejezte, nepijte nic kromě **neslazené nesycené vody**, nežvýkejte, nekuřte ani neprovádějte ústní hygienu

Pro nejlepší výsledky si bezprostředně před odběrem vypláchněte ústa vodou

<p>1</p> 	<p>Opatrně otevřete balení na jednom konci</p>
<p>2</p> 	<p>Vyjměte odběrovou tyčinku ze sáčku tak, abyste se rukou nedotkli bílého tamponu na konci. Během celého procesu odběru dbejte na to, aby celá tyčinka i s tampónem nepřišla za žádných okolností do styku s jiným materiálem než s buňkami bukální sliznice odebrané osoby!!!</p>
<p>3</p> 	<p>Vložte odběrovou tyčinku do úst a intenzivně stírejte vnitřní stranu tváře nebo prostor mezi dásněmi a ústy. Pro standardní odběr DNA stírejte nejméně 1 minutu.</p> <p>Důležité – při stěru vyvíjejte přiměřený a stálý tlak!!!</p> <p>Pokud se Vám v průběhu odběru tvoří sliny, polkněte je (setřít je tampónem je nežádoucí)!!!</p>
<p>4</p> 	<p>Po dokončení stěru zasuňte odběrovou tyčinku (koncem s bílým tampónem napřed) do (malého) sáčku RapiDri (součást balení) tak, aby tampon ležel v sušící oblasti (označeno „Drying Area“)</p>
<p>5</p> 	<p>Přehněte sáček RapiDri ve vyznačeném místě (označeno „Fold Line“) tak, aby fólie přiléhala k fólii a zalepte přiloženou samolepkou v čárovém kódem. Na samolepku napište jméno a příjmení odebrané osoby.</p>

Po dokončení odběru ponechte sáček s odběrovým tampónem do odeslání při pokojové teplotě. Odebraný vzorek vložte společně s vyplněnou dokumentací do obálky a odešlete co nejdříve na naši adresu: **EUC LaboratořCGB a.s, Kořenského 6, 703 00 Ostrava Vítkovice, tel: 595 700 117.**